


PROTOCOLLO ATTIVAZIONE DISTAL JET

Il Distal jet viene inviato in studio con le **molle attivate** e con una **legatura metallica** per facilitarne l'applicazione.

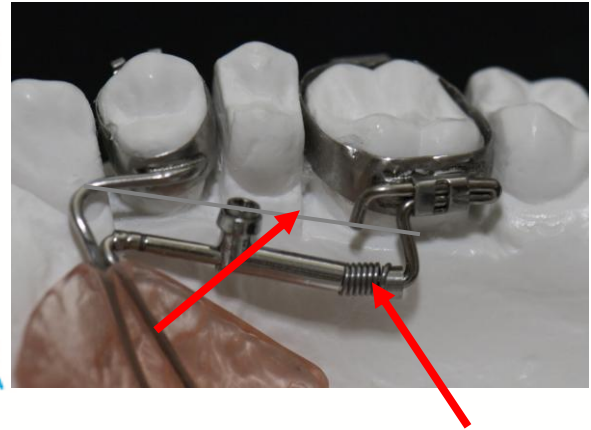

Dopo la cementazione rimuovere le due legature metalliche.



ATTIVAZIONE

L'apparecchio va attivato ad intervalli di 4/6 settimane con la **completa compressione della molla** che si ottiene spostando distalmente la vite di attivazione.

Le rotazioni dei molari vanno corrette prima dell'attivazione.



Dopo la distalizzazione convertire il Distal Jet in contenzione sfilando la molla dall'apparecchio e facendo scivolare il chiavistello con decisione contro lo stop ed avvitare la vitina. Comprimere il terminale del chiavistello sul filo a baionetta.

