





APPROCCIO AL DISGIUNTORE RAPIDO PALATALE

Il Disgiuntore Palatino Rapido fa parte della famiglia degli apparecchi fissi adatti ad ottenere un'espansione trasversale dell'arcata superiore. La sua azione avviene a livello suturale e normalmente è molto rapida e indolore.

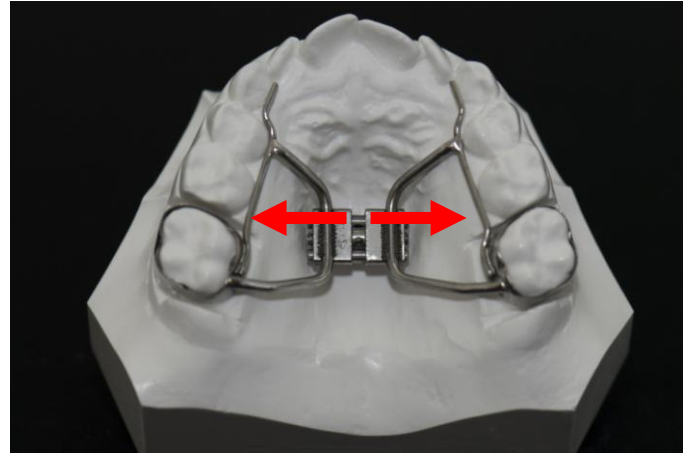

Nella fase di cementazione è consigliato di bondare, con del composito, il braccetto di appoggio sul canino al dente.

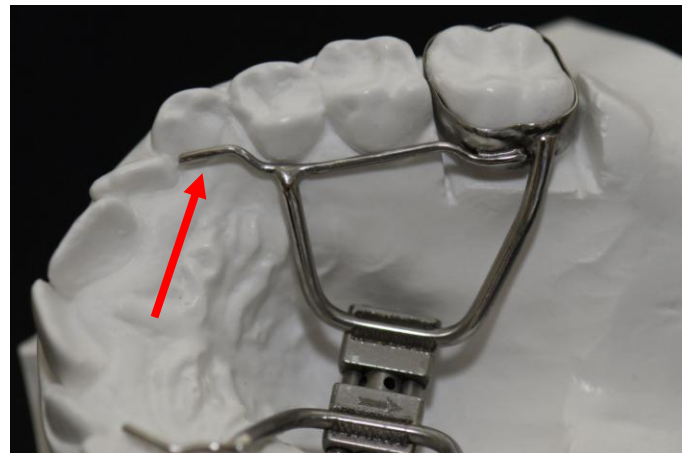

Le attivazioni devono essere effettuate ogni **12 ore** utilizzando l'apposita chiavetta. **Ogni attivazione corrisponde a 2/10 di millimetro, 5 attivazioni 1 mm.**

Terminata la fase di attivazione il Disgiuntore dovrà essere bloccato con resina o filo metallico sulla vite, iniziando così il percorso di contenimento della durata di 6 mesi circa.

