

PROCEDURA DI UTILIZZO DELL'ORTHOGRILLE **(DR.SSA M.J. DESHAYES)**

Gent.ma Dr.ssa, Egregio Dr.

dall'area download del sito www.ortotecnic.com ha scaricato l'ORTHOGRILLE® in formato digitale, qui di seguito troverà tutte le indicazioni per utilizzarla al meglio.

L' ORTHOGRILLE® è un file word pertanto per utilizzarla bisogna aprire questo programma.

Inizialmente aprire il file word con la fotografia del modello in gesso che volete analizzare (figura 1)



Figura 1

Successivamente dal menu INSERISCI, inserire l'immagine dell' ORTHOGRILLE® in formato digitale e sovrapporla alla fotografia del vostro modello in gesso (per sovrapporla bisogna cliccare sull'immagine dell' ORTHOGRILLE® con il tasto destro, scegliere dal menu "TESTO A CAPO" l'opzione "davanti al testo"). (figura 2)

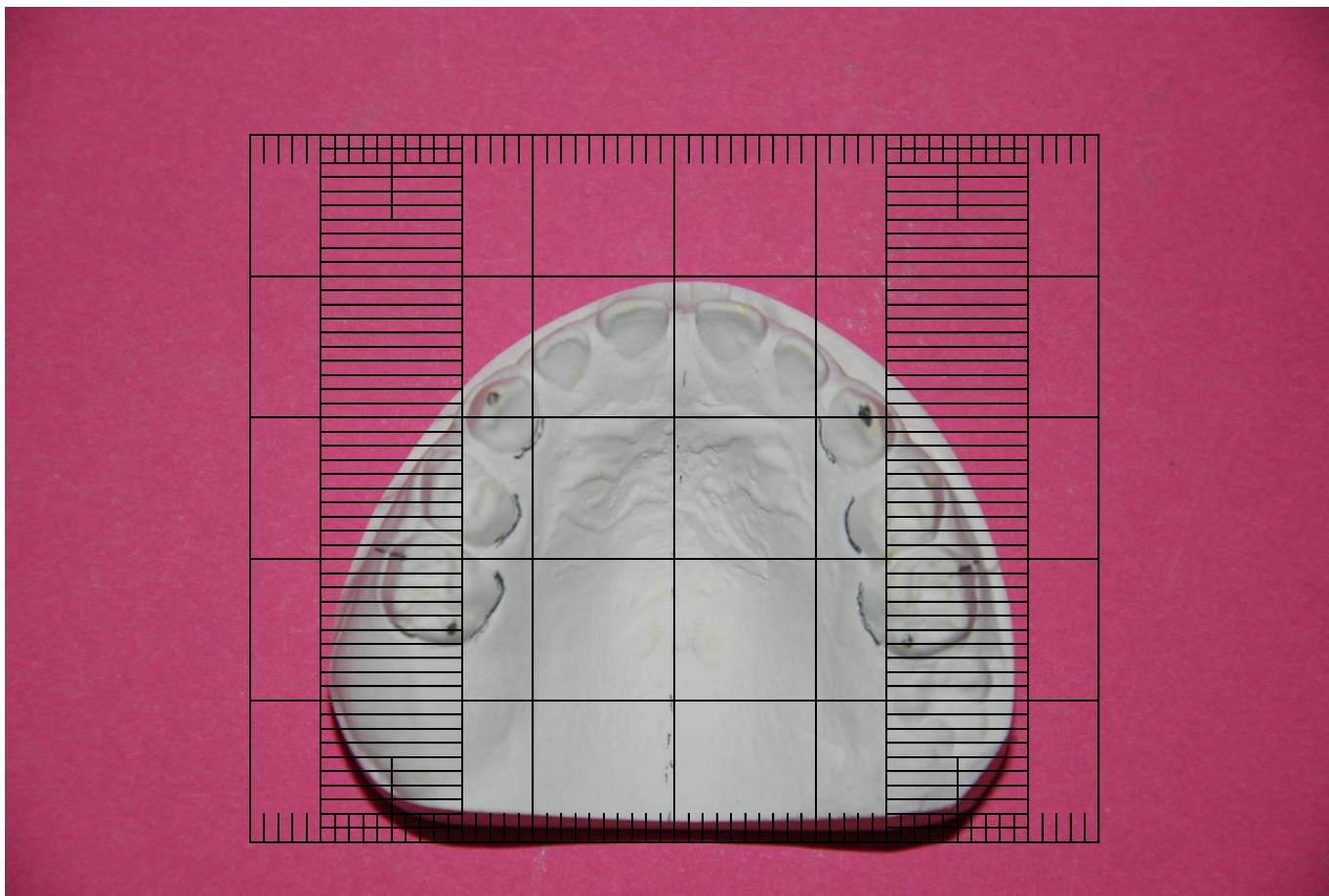


Figura 2

Cliccando sull'immagine dell' ORTHOGRILLE® digitale nella parte alta dell'immagine vi apparirà un bollino verde; con questo potete ruotare la vostra ORTHOGRILLE® in modo da adattarla al meglio alla fotografia del vostro modello in gesso (stessa cosa può essere effettuata direttamente sull'immagine del modello stesso).

Al fine di utilizzare al meglio il file che avete scaricato, consigliamo di fotografare i modelli in modo perpendicolare meglio con un semplice stativo per allineare perfettamente il mirino con il rafe e di attenervi a quanto spiegato dalla Dr.ssa Deshayes durante il corso a Bergamo (28/29 settembre 2012).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti